

## ファルシーズ取扱いのご注意

1. 針やナイフやはさみなど、先のとがったもので触れないでください。



2. シンナーなどの溶剤で拭かないでください。



3. プールや海でご使用いただいた場合は、ご使用後真水でお洗ってください。




4. 洗濯機で洗わないでください。

汚れた場合は中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。



5. 洗ったあとは、軽くタオル等で水分を拭き取ってください。  
手で絞らないようにしてください。

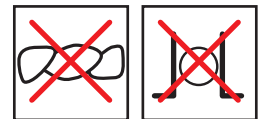

6. 必要以上に圧迫するのはお止めください。

7. ベタつく場合は簡単に水洗いして頂くか、ベビーパウダー等をはたいて頂くとさらっとした手触りになります。

ご使用に関しまして、ご質問・ご不明な点等ございましたら、  
下記までお問い合わせください。

Ikeyama  Medical Japan

株式会社 池山メディカルジャパン

<http://www.ikeyama-mj.com>