


お手入れとご使用方法


ご使用方法

- ①人工乳房を専用ネット又はケースから取り出し、水気が残っている場合は乾いたキッチンペーパーや柔らかい布で水気を取ってからご使用ください。
- ②接着するときには、お肌は乾いた状態にしておきましょう。
人工乳房に接着剤を塗り（約1.5～2cm幅）、5分程待ちます。
※しっかり乾かします。触って糸を引かないくらいが目安です。
- ③接着剤が乾く間に皮膚保護剤を、お胸の方に塗ります。
※接着剤が着く範囲より少し広めに塗り2分程乾かします。
- ④接着剤と皮膚保護剤が、完全に乾いた状態で接着して下さい。
※軽くあてながら位置を確認し貼る位置が決まりましたら、接着剤の着いている範囲を人工乳房の上から、やさしく押すように接着してください。
- ⑤湿度の高い時期には人工乳房の表面にベビーパウダーを使用することにより肌触りがよくなります。

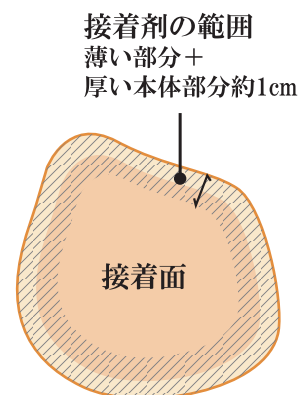

お手入れ方法

- ①お肌を休ませるためにも、就寝前には取りはずしてください。
接着除去剤で辺縁からゆっくり剥がしてください。
お肌と人工乳房の隙間を広げるようなイメージでやさしく行ってください。
※その際、シートの面を変えながら綺麗な面を使っていきましょう。
- ②お肌に着いた接着剤と人工乳房の裏側（接着面）を接着除去剤で拭いてください。
※人工乳房の接着面も接着除去剤を使い、やさしくクルクルと円を描くようにしながら、残った接着剤を取り除いてください。
- ③その後水洗いをしてA g イオンスプレーを接着面にスプレーしてください。
※特に汚れのひどい場合は、石鹼やボディソープで洗い、しっかりすすいで下さい。
- ④専用ネットに人工乳房の接着面を下向きに入れて、室内干し（自然乾燥）してください。
直射日光にはあてないよう気をつけましょう。
※取り切れない接着剤にホコリや繊維が付くのを防ぐためにも、タオルや繊維の多い物では拭かず、ネットに入れた状態で乾かすか、付属のプレストシート等の上に置くようにしましょう。

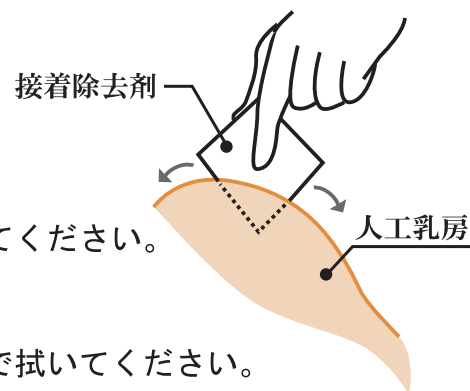

注意

- ・接着は一日ごとに外し、ご使用になられるときに新たに接着剤を塗ってご使用ください。
- ・接着剤は乾くまで匂いが気になる場合がありますので、出来るだけ顔から離してご使用ください。
- ・長期間ご使用にならない場合、A g イオンスプレーをスプレーしてよく乾かした後、人工乳房の接着面を専用プレストシートの上に置いて保管してください。この時に、濡れたままケース保存されますと変色やカビなどの原因となりますのでご注意ください。
- ・ご使用状況により、ひどいかゆみやかぶれ等が生じた場合は、すぐに使用を中止し、直ちに専門の医師の手当てを受けてください。
- ・ボールペンや金属の尖った物、ペットの爪などシリコンの裂ける可能性のある物には注意してください。
- ・接着除去剤でマニキュアが剥げる場合がございます。